

毎日の臨床に役立つ お薦めの逸品

ビスコスタット
(ティッシュマネージメント システム)

わずか数秒のマージンコントロール



出血を伴う歯肉縁下での形成



デントインフューザーチップの先端は柔らかいコットン羽付き。



硫酸鉄 20%のビスコスタットジェル

必要量 0.3ml 程をシリンジに移し、デントインフューザーチップを接続



ポイント 1

創面にビスコスタットをスリ込みます。

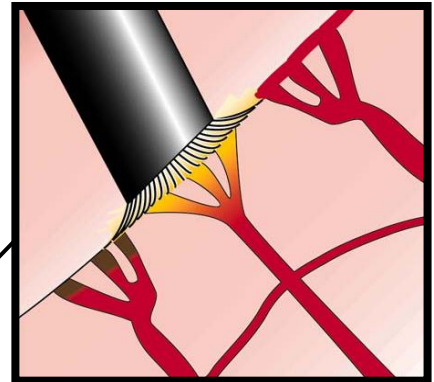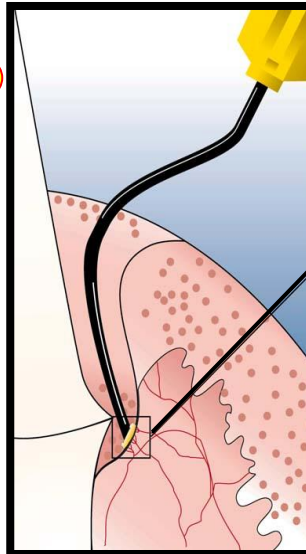

主成分の硫酸鉄とチップの圧力とで創面の毛細血管内にコルク栓のように凝塊で蓋をします。



ポイント 2


強力なスプレーで患部に残る凝塊を洗浄し、止血を確認します。



圧排糸を挿入し、1~3分程歯肉を圧排します。



圧排糸を外し、患部を洗浄

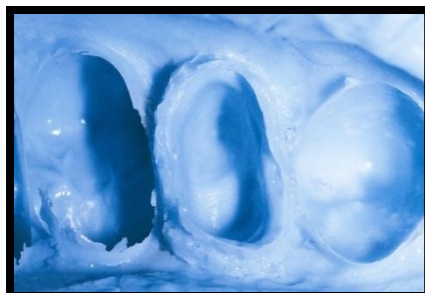

精度の高い印象採得



※商品のご用命は、本誌裏面の注文書をご使用ください。



毎日の臨床に役立つ お薦めの逸品

ビスコスタット

注文方法：下記の申込書に必要個数をご記入の上、当社宛てに FAX 頂くか営業担当者にお渡しください。

商品番号	商品名	販売価格	個数
#649-JP	ビスコスタット ティッシュマネージメントキット	¥16,500	
#647-JP	ビスコスタット デントインフューザー シリンジキット	¥7,000	
#645-JP	ビスコスタット リフィル シリンジ 30ml	¥4,400	
#1278-JP	ビスコスタット エンプティシリンジ 1,2ml 20本	¥1,000	
#122-JP	デントインフューザーチップ 20個	¥1,800	
#125-JP	デントインフューザーチップ 100個	¥8,400	
#1034-JP	デントインフューザーチップ 500個	¥28,000	
#128-JP	ブルーミニ デントインフューザーチップ 20個	¥1,800	
#1086-JP	ブルーミニ デントインフューザーチップ 100個	¥8,400	
#1440-JP	ブルーミニ デントインフューザーチップ 500個	¥27,900	

※ビスコスタットを初めてご使用になられる場合は、#647-JP のスターターキットをお薦めいたします。

貴医院名	ご住所（お電話番号）
	TEL : ()

※お申込書にご記入頂きました個人情報は、商品の案内などに利用させて頂き、その目的以外で第三者へ提供することはありません。

商品のご用命は：

株式会社 滝沢歯科器械店 担当 迄

本社	TEL : 0268-27-3351	ご注文 FAX : 0268-27-9307
----	--------------------	------------------------

●ホームページもご覧ください。

株式会社 滝沢歯科器械店

ULTRADENT JAPAN 株式会社

<http://www.takizawa-dentalnet.com>

<http://www.ultradentjapan.com>